

GUANTES HIPOTÉRMICOS ELASTO-GEL



Indicaciones

Prevención de onicólisis y toxicidad en la piel asociada a los tratamientos con docetaxel.

Descripción del Producto

- El hidrogel a base de glicerina permanece flexible incluso a temperaturas muy bajas.
- La funda elástica se puede retirar para facilitar su lavado con agua y jabón.
- La cinta de sujeción a la muñeca asegura la correcta posición durante el tratamiento.

Información General

Toxicidad en las uñas (discromia y onicólisis) ocurre en aproximadamente un 50% de los pacientes tratados con docetaxel. Puede causar inflamación, alteraciones neurogénicas, alteraciones angiogénicas y/o infección.

Ha sido demostrado por un estudio multicéntrico (*) de control de casos que los guantes congelados y flexibles Elasto-Gel reducen significativamente la toxicidad en uñas y piel asociada con docetaxel y ofrece una nueva herramienta de apoyo en las directrices de cuidados para una mejor calidad de vida del paciente.

- Reducción de las tasas de toxicidad:
 - Toxicidad de uñas: 11% versus 51%
 - Toxicidad cutánea: 24% versus 53%
($p=0,0001$)
- No aparece onicólisis de grado 2 al usar el guante
- Retrasa la aparición de toxicidad

Contraindicaciones: - Síndrome de Raynaud

- Metástasis distal
- Arteriopatía distal
- Intolerancia al frío

* Dr. F. Scotté, et al., Journal of Clinical Oncology, 2004 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 22, No 14S (July 15 Supplement), 2004: 8003

Instrucciones de Uso

Conservar el producto en un congelador durante un mínimo de tres (3) horas (recomendables 12h). Puede dejarse en el congelador indefinidamente hasta su utilización. Permanecerá flexible incluso a -30º. Sacar el producto antes de descongelar el congelador.

Instrucciones de Limpieza

Sacar la funda y lavar a mano con agua fría y un poco de jabón. Tender para secarla. Pasar un trapo húmedo (no mojado) por la parte blanca interior de la funda utilizando un poco de jabón o desinfectante.

Nota Importante

Guardar siempre los guantes en un bolsa de plástico cuando se introduzcan en el congelador. Los guantes deben secarse completamente, el hidrogel absorbería el agua y se hincharía. Si el producto se humedece, dejarlo sobre una superficie plana hasta que se seque completamente antes de usarlo de nuevo.

CE Dispositivo Medico, Clase I, Directiva Europea 93/42/CEE



GUANTES HIPOTÉRMICOS

INDICACIONES

Prevención de la onicólisis durante tratamientos de quimioterapia.

CONTRAINDICACIONES

- Síndrome de Reynaud
- Metástasis distal
- Arteriopatía distal
- Intolerancia al frío

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los guantes hipotérmicos Elasto-Gel están hechos con hidrogel a base de glicerina. Este material permite que los guantes sean flexible pese a encontrarse congelados. El forro está confeccionado con una tela elástica impermeable. La cinta de ajuste que se encuentra situada en la zona del puño, permite un total ajuste del guante a la mano del paciente.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Mantenga los guantes en una bolsa de plástico en un congelador a una temperatura de entre -25º y -30º C al menos durante las 12 horas anteriores a su uso.
- 2- Use los guantes desechables dentro de los guantes hipodérmicos como higiene.
- 3- Coloque los guantes hipodérmicos en las manos 15 minutos antes de iniciar el tratamiento y déjelos puestos hasta que pasen 15 minutos desde la finalización del tratamiento.

NOTAS IMPORTANTES

El cambio de los guantes se debe efectuar de una manera rápida a fin de evitar reflejos de vasodilatación. Los guantes deben ser utilizados en cada sesión de terapia, puesto que una interrupción en su uso podría comprometer su eficacia. Después de uso, seque completamente los guantes antes de volverlos a meter en el congelador para su próximo uso.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la superficie externa con agua y jabón, aclare y seque. **Nunca deje los guantes en remojo.**

Documentación Básica e Instrucciones Guantes Hipotérmicos Elasto-Gel

Versión 01/01/2010

Pedidos y contacto: 93.1.93.22.49

GARANTÍA

Los productos terapéuticos Elasto-Gel tienen una garantía de 6 meses desde la fecha de su compra.