

ZAPATILLAS HIPOTÉRMICAS ELASTO-GEL

Una nueva herramienta de apoyo para el cuidado en el Cáncer



Indicaciones

Prevención de onicólisis y toxicidad en la piel asociada a los tratamientos con docetaxel.

Descripción del Producto:

- El hidrogel a base de glicerina permanece flexible incluso a temperaturas muy bajas.
- La funda elástica se puede retirar para facilitar su lavado con agua y jabón.
- La cinta de sujeción al tobillo asegura la correcta posición durante el tratamiento.

Información General

Toxicidad en las uñas (discromia y onicólisis) ocurre en aproximadamente un 50% de los pacientes tratados con docetaxel. Puede causar inflamación, alteraciones neurogénicas, alteraciones angiogénicas y/o infección.

Ha sido demostrado por un estudio multicéntrico (*) de control de casos que los guantes congelados y flexibles Elasto-Gel reducen significativamente la toxicidad en uñas y piel asociada con docetaxel y ofrece una nueva herramienta de apoyo en las directrices de cuidados para una mejor calidad de vida del paciente.

- Reducción de las tasas de toxicidad:
 - Toxicidad de uñas: 11% versus 51%
 - Toxicidad cutánea: 24% versus 53%
($p=0,0001$)
- No aparece onicólisis de grado 2 al usar el guante
- Retrasa la aparición de toxicidad

Contraindicaciones: - Síndrome de Raynaud
 - Metástasis distal
 - Arteriopatía distal
 - Intolerancia al frío

* Dr. F. Scotté, et al., Journal of Clinical Oncology, Vol 23, No 19 (July 1, 2005), 4424-4429. "Multicenter Study of a Frozen Glove to Prevent Docetaxel-induced Onycholysis

Instrucciones de Uso

Conservar el producto en un congelador durante un mínimo de tres (3) horas (recomendables 12h). Puede dejarse en el congelador indefinidamente hasta su utilización. Permanecerá flexible incluso a -30º. Sacar el producto antes de descongelar el congelador.

Instrucciones de Limpieza

Pasar un trapo húmedo (no mojado) por la funda utilizando un poco de jabón o desinfectante.

Nota Importante

Guardar siempre las polainas en un bolsa de plástico cuando se introduzcan en el congelador. Las polainas deben secarse completamente, el hidrogel absorbería el agua y se hincharía. Si el producto se humedece, dejarlo sobre una superficie plana hasta que se seque completamente antes de usarlo de nuevo.

CE Dispositivo Medico, Clase I, Directiva Europea 93/42/CEE



POLAINAS HIPOTÉRMICAS

INDICACIONES

Prevención de la onicólisis durante tratamientos de quimioterapia.

CONTRAINDICACIONES

- Síndrome de Reynaud
- Metástasis distal
- Arteriopatía distal
- Intolerancia al frío

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las polainas hipotérmicas Elasto-Gel están hechas con hidrogel a base de glicerina. Este material permite que las polainas sean flexibles pese a encontrarse congeladas.

El forro está confeccionado con una tela elástica impermeable. La cinta de ajuste que se encuentra situada en la zona del talón, permite un total ajuste de las polainas al pie del paciente.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Mantenga las polainas en una bolsa de plástico en un congelador a una temperatura de entre -25º y -30º C al menos durante las 12 horas anteriores a su uso.
- 2- Use calcetines/fundas para pie desechables dentro de las polainas hipotérmicas como higiene.
- 3- Coloque las polainas hipotérmicas en las manos 15 minutos antes de iniciar el tratamiento y déjelos puestos hasta que pasen 15 minutos desde la finalización del tratamiento.

NOTAS IMPORTANTES

El cambio de las polainas se debe efectuar de una manera rápida a fin de evitar reflejos de vasodilatación. Las polainas deben ser utilizadas en cada sesión de terapia, puesto que una interrupción en su uso podría comprometer su eficacia. Después de uso, seque completamente las polainas antes de volverlos a meter en el congelador para su próximo uso.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Documentación Básica e Instrucciones Zapatillas Hipotérmicas Elasto-Gel

Versión 01/01/2010

Pedidos y Contacto: 93.1.93.22.49

Limpie la superficie externa con agua y jabón, aclare y seque. **Nunca deje las polainas en remojo.**

GARANTÍA

Los productos terapéuticos Elasto-Gel tienen una garantía de 6 meses desde la fecha de su compra

